

## SmearSafe™ Blutentnahme – ohne das Röhrchen zu öffnen


Einfach – schnell – hygienisch

- Reduzierung der Arbeitsschritte
- Bietet Zeitersparnis
- Liefert einheitliche Tropfen zur Probennahme
- Einfache Handhabung
- Erhöht den hygienischen Standard



QualRep Services B.V.  
P.O. Box 302  
1440 AH, Purmerend  
The Netherlands  
T: 0031 (0) 85 7440000  
F: 0031 (0) 299 660271

STRADIS-MED GmbH  
Boschring 12  
D-63329 Egelsbach  
Amtsgericht Offenbach HRB 42891  
Tel: +49 (0) 6103 73333-0  
Fax: +49 (0) 6103 73333-10  
E-Mail: [info@stradis-med.de](mailto:info@stradis-med.de)  
Web: [www.stradis-med.de](http://www.stradis-med.de)

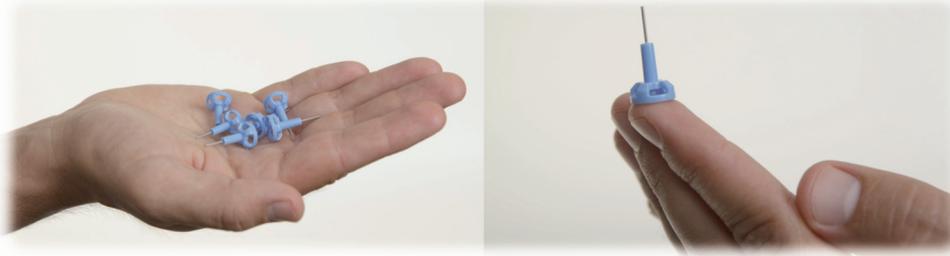

## SmearSafe™ Blutentnahme - ohne das Röhrchen zu öffnen

SmearSafe™ wurde zur leichten Entnahme eines Tropfen Blut aus einem geschlossenen Röhrchen entwickelt. Es liefert einen angemessenen Tropfen für den manuellen Blutaussstrich. SmearSafe™ ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und kompatibel mit Vacutainer®, Vacuette® und anderen Blutentnahmeröhrchen.

1. Halten Sie das Röhrchen aufrecht.  
Fügen Sie das SmearSafe™ in den Deckel des Röhrchens ein, bis die Kanüle nicht mehr sichtbar ist.
2. Drehen Sie das Röhrchen mittig über dem Objektträger oder der Zieloberfläche um.  
Drücken Sie das Röhrchen leicht nach unten, bis ein Tropfen aus dem SmearSafe™ fällt.
3. Sobald der Tropfen den Objektträger berührt, lösen Sie den Druck und heben das Röhrchen gerade an.  
Bitte beachten Sie: Die Größe des Tropfens kann, basierend auf der Geschwindigkeit und dem Druck, der auf das Röhrchen ausgeübt wird, kontrolliert werden.  
Ziehen Sie nach Gebrauch das SmearSafe™ aus dem Röhrchen, indem Sie den Deckel des Röhrchens fixieren.  
Entsorgen Sie das SmearSafe™ nach Gebrauch in einem dafür vorgesehenen Behälter.

### Hinweis:

1. Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen
2. Die Kanüle des SmearSafe™ kann Verletzungen am Handschuh verursachen.
3. Fügen Sie das SmearSafe™ nur in ein senkrecht aufgestelltes Röhrchen ein
4. Stellen Sie sicher, dass der Deckel vollständig auf dem Röhrchen aufgesetzt und dieses verschlossen ist.

- **Anwendung:** zum einmaligen Gebrauch, In-vitro
- **Verpackung:** 1000 SmearSafes™ pro Box (2 Beutel á 500 Stück)
- **Artikel-Nr:** C1000  
FDA geprüft

