


Typenex.

TypeSafe™ Segmentöffner

EINFACH - SICHER - HYGIENISCH

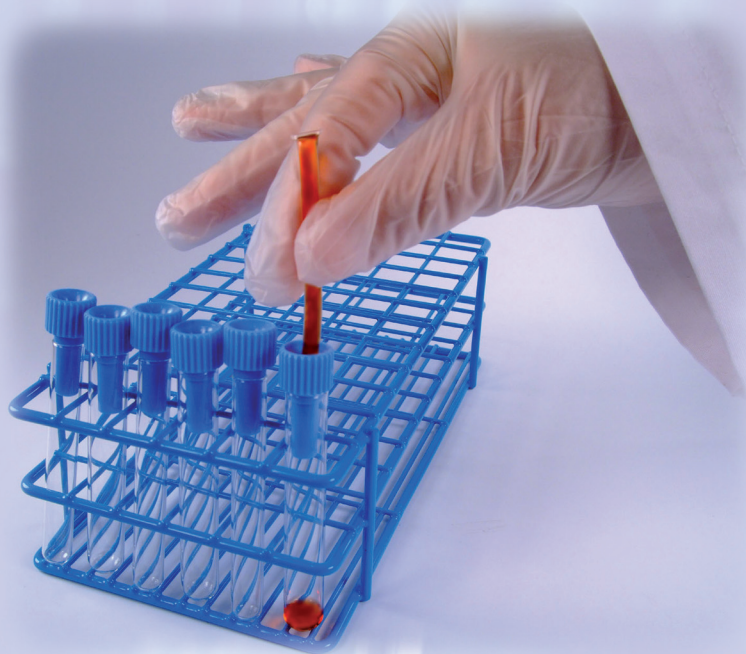

Ideal für Kreuzprobenlabore

- Leichte Probenentnahme aus Schlauchsegmenten
- Einfaches Passieren der Zellen durch eine lange Kanüle
- Gut greifbar auch mit Schutzhandschuhen durch Rippdesign
- Geeignet für 10 ml und 12 ml Probenröhrchen
- Für alle Standartsegmentgrößen geeignet

STRADIS-MED GmbH
Woogstrasse 48
D-63329 Egelsbach
Amtsgericht Offenbach
HRB 42891
Office: +49 6103 - 70 64 22
Fax: +49 6103 - 70 64 229
info@stradis-med.de
www.stradis-med.de






TypeSafe™ Segmentöffner

Der TypeSafe™ Segmentöffner ist zur einfachen Probenentnahme von Schlauchsegmenten entwickelt worden und ermöglicht einen einfachen und schnellen Einsatz im Kreuzlabor, ohne Kontaminationsgefahr, sicher und hygienisch!

- Führen Sie das dünne Ende des TypeSafe™ Segmentöffners in das Probenröhrchen ein
- Vergewissern Sie sich, dass das Röhrchen senkrecht im Halter ausgerichtet ist
- Führen Sie das Blutsegment in den TypeSafe™ ein und drücken Sie sanft, bis die Nadel das Segment durchstochen hat
- Üben Sie Druck auf das Segment aus, bis das Blut in das Probenröhrchen fließt
- Wenn die gewünschte Probe sich im Probenröhrchen verteilt hat, entfernen Sie das TypeSafe™ mit dem Segment
- Entsorgen Sie beides in dafür vorgesehene Behälter
- Nur für den einmaligen Gebrauch
- Nur für die in-vitro Anwendung

- **Highlights:** FDA geprüft
- **Anwendung:** Single use, In-vitro
- **Verpackung:** 500 Stück pro Beutel
2 Beutel pro Box (1.000 Stück/Box)
- **Artikel-Nr.:** 4R4750

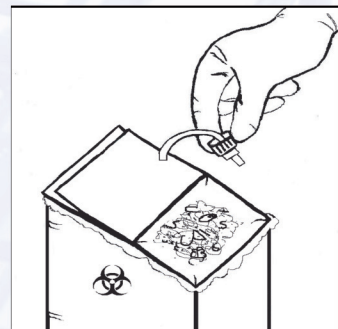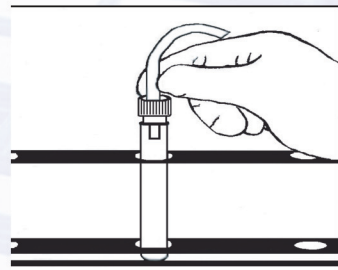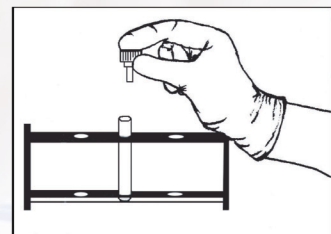

QualRep Services B.V.
P.O. Box 302
1440 AH, Purmerend
The Netherlands
T: 0031 (0) 85 7440000
F: 0031 (0) 299 660271

STRADIS-MED GmbH
Woogstrasse 48
D-63329 Egelsbach
Amtsgericht Offenbach
HRB 42891
Office: +49 6103 - 70 64 22
Fax: +49 6103 - 70 64 229
info@stradis-med.de
www.stradis-med.de